

Istruzioni per l'uso

REF CE-21001-048

DESTINAZIONE D'USO

SalivaGard HT DNA è destinato alla raccolta e alla conservazione del DNA da saliva umana per l'uso in applicazioni in vitro. Questo prodotto è SOLO PER L'ESPORTAZIONE. Non viene venduto negli Stati Uniti.

SOMMARIO E PRINCIPI

SalivaGard HT DNA è stato progettato l'autoraccolta, la conservazione, la spedizione e lo stoccaggio efficaci, e per il trattamento automatizzato di campioni di saliva per la purificazione e l'analisi del DNA. I campioni di DNA da saliva raccolta con SalivaGard HT DNA sono stabili a temperatura ambiente (da 15°C a 30°C) per un massimo di 12 mesi, e assicurano un'elevata resa di DNA di qualità tramite un'ampia gamma di kit per la purificazione del DNA commerciali.

CONTENUTO DEL KIT



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. Per uso diagnostico in vitro.
2. NON usare se la confezione è danneggiata o se il sigillo di garanzia del tappo dell'imbuto è rotto o perde.
3. NON usare oltre la data di scadenza.
4. Evitare il contatto della pelle con il reagente SalivaGard HT DNA.
5. NON ingerire il reagente SalivaGard HT DNA.
6. Pericolo di soffocamento: il tappo della provetta rappresenta un potenziale pericolo di soffocamento.

Il contenuto di questo kit può provocare irritazione alla pelle e agli occhi.

1. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone, e risciacquare accuratamente.
2. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con una grande quantità di acqua per almeno 15 minuti, e consultare un medico.
3. In caso di deglutizione accidentale, consultare immediatamente un medico.
4. In caso di ingestione o accidentale o contatto con la pelle, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Tutte le informazioni sulle schede di sicurezza sono disponibili sul sito http://biomatrica.com/support_sds.php.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Prima della raccolta:

1. Conservare i kit SalivaGard HT DNA a temperatura ambiente (da 15°C a 30°C) fino alla data di scadenza indicata.
2. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole.


Dopo la raccolta:

1. Conservare le provette con i campioni SalivaGard HT DNA a temperatura ambiente per un massimo di 12 mesi.


PRECAUZIONI PER LA RACCOLTA

1. NON mangiare, bere, fumare o masticare chew gum 30 minuti prima di fornire un campione di saliva, altrimenti i risultati potrebbero essere alterati.
2. Non rimuovere il sigillo di garanzia dal tappo dell'imbuto.
3. Se il liquido non esce dopo aver ruotato il tappo dell'imbuto, premere e ruotarlo ulteriormente. Se il liquido continua a non uscire, scartare il dispositivo intatto.
4. Non rimuovere il tappo dell'imbuto.


ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DA PARTE DEI DONATORI

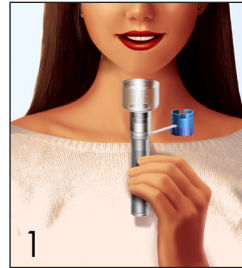


1. Tenere la provetta per campioni in verticale. Sputare nell'imbuto finché il livello della saliva (bolle/schiuma escluse) non si trova tra le linee di riempimento MIN e MAX contrassegnate sulla provetta. Se il flusso della saliva dall'imbuto alla provetta per campioni è lento, picchiettare il fondo della provetta su una superficie dura e piana.

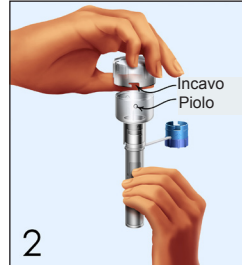


2. Posizionare il tappo dell'imbuto allineando l'incavo con il piolo. Premere con fermezza sul tappo dell'imbuto per rompere il sigillo di garanzia.

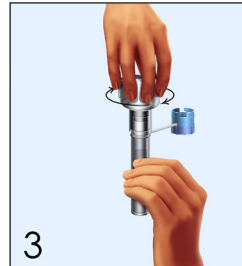


3. Ruotare lentamente ma con fermezza in senso orario finché il tappo dell'imbuto non si blocca (si sente un clic). Attendere 10 secondi per accertarsi che tutta la soluzione stabilizzante sia fluita nella provetta per campioni. Se il flusso dall'imbuto alla provetta per campioni è lento, picchiettare il fondo della provetta su una superficie dura e piana.

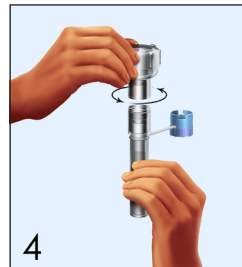

4. Svitare e gettare l'imbuto e il relativo tappo come un unico pezzo.

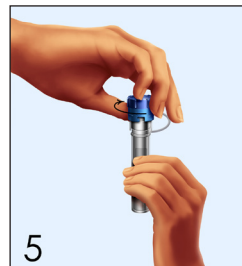

5. Avvitare saldamente il tappo della provetta sulla provetta per campioni.

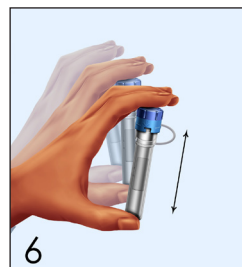

6. Agitare la provetta per campioni per 5 secondi.

Biomātrica, Inc.
5627 Oberlin Drive, Suite 120
San Diego, CA 92121, USA

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Informazioni su come effettuare l'ordine:
Web: www.biomatrica.com
Email: orders@biomatrica.com
Telefono: 00 1 858 550 0308

Doc # 130061CE-Italian Rev C - 20170718

Glossario dei simboli armonizzati

IVD	Dispositivo in vitro	15°C-30°C	Limitazione di temperatura	🕒	Usare entro
REF	Numero di catalogo	🚫	Non riutilizzare	EC REF	Rappresentante autorizzato
LOT	Codice pacchetto	☀️	Tenere lontano dalla luce del sole	CE	Marcatura CE
📖	Consultare le istruzioni				

SalivaGard HT DNA IFU Indicazioni

Istruzioni per l'uso possono essere ottenuti via internet al <http://biometrica.com/salivagard-ht-dna.php>, chiamando il seguente numero di telefono: 00 1 858 550 0308, o chiamando il fornitore locale.