

Instrucciones de uso

REF CE-21001-048


USO PREVISTO

SalivaGard HTADN está destinado para la recogida y conservación de la saliva humana ADN para su uso en aplicaciones de Diagnóstico In Vitro. Este producto es SÓLO PARA EXPORTACIÓN. Este producto no es para vender en Estados Unidos.

RESUMEN Y PRINCIPIOS

SalivaGard HTADN está diseñado para la auto-recogida eficiente, conservación, transporte, almacenamiento y procesamiento automatizado de muestras de saliva humana para la purificación y el análisis de ADN. Las muestras de saliva de ADN de saliva que usan SalivaGard HTADN son estables a temperatura ambiente (15°C a 30°C) un máximo de 12 meses, y produce ADN de alta calidad usando una amplia selección de kits comerciales de purificación de ADN.

CONTENIDOS DEL KIT

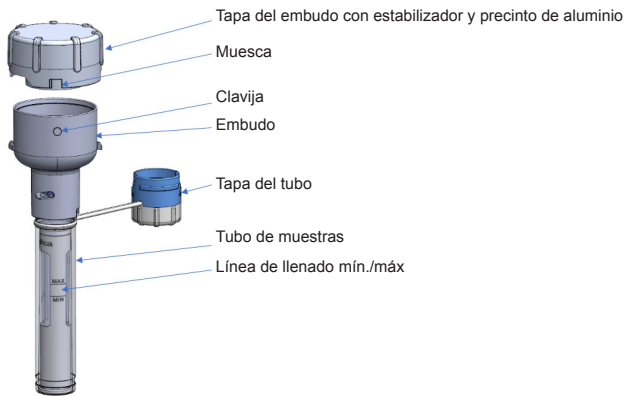

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Para diagnóstico in vitro.
2. No usar si el embalaje está dañado o el precinto de aluminio de la tapa del embudo está roto o tiene fugas.
3. No usar después de la fecha de caducidad.
4. Evitar el contacto de la piel con el reactivo SalivaGard HTADN.
5. No ingerir el reactivo SalivaGard HTADN.
6. Peligro de asfixia: El tapón del tubo es un riesgo potencial de asfixia.

El contenido de este kit puede causar irritación en la piel y en los ojos.

1. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
  2. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos y acudir al médico.
  3. Si se produce la ingestión accidental, acudir al médico inmediatamente.
  4. Consultar SDS en caso de ingestión accidental o contacto con la piel.
- Toda la información SDS está disponible en [http://biometrica.com/support\\_sds.php](http://biometrica.com/support_sds.php).

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Pre-recogida:

1. Almacenar los kits de SalivaGard HTADN a temperatura ambiente (15°C a 30°C) hasta el final de la vida útil marcada por la fecha de caducidad.
2. Evitar la exposición directa a la luz solar.


Post-recogida:

1. Almacenar los tubos de muestras de SalivaGard HTADN a temperatura ambiente un máximo de 12 meses.


PRECAUCIONES DE RECOGIDA

1. NO comer, beber, fumar, ni masticar chicle 30 minutos antes de proporcionar saliva o los resultados pueden verse afectados.
2. No quitar el precinto de aluminio de la tapa del embudo.
3. Si el líquido no se distribuye después de torcer la tapa del embudo, presionar y girar más. Si el líquido aún no se distribuye, desechar el dispositivo intacto.


INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DEL DONANTE DES DONNEURS

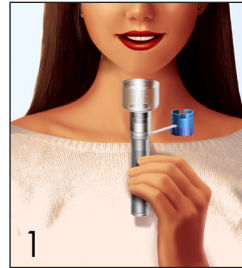


1. Mantener el tubo de muestra en posición vertical. Escupir en el embudo hasta que el nivel de la saliva (excluyendo burbujas/es-puma) esté entre las marcas de llenado MIN y MAX marcadas en el tubo de muestra. Si el flujo de saliva desde el embudo al tubo de muestra es lento, tocar la parte inferior del tubo contra una superficie dura y nivelada.

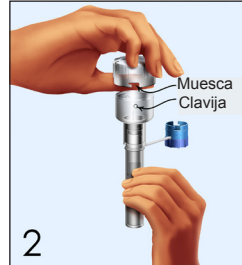


2. Colocar la tapa del embudo en el embudo alineando la muesca con la clavija. Presionar firmemente hacia abajo en la tapa del embudo para romper el precinto de aluminio.

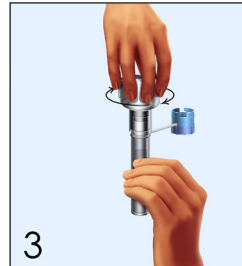


3. Girar lentamente y con firmeza en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa del embudo se cierre (sonido de clic). Esperar 10 segundos para asegurarse de que todas la solución estabilizadora ha fluido en el tubo de muestra. Si el flujo de saliva desde la tapa del embudo al tubo de muestra es lento, tocar la parte inferior del tubo de muestra contra una superficie dura y nivelada.

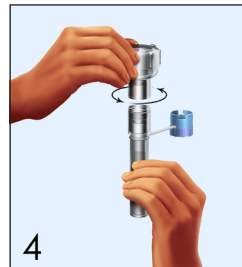

4. Desenroscar y desechar el embudo y la tapa del embudo juntos como una sola pieza.

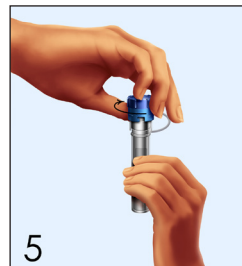

5. Atornillar la tapa del tubo firmemente en el tubo de muestra.

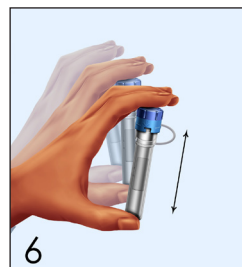

6. Agitar el tubo de muestra durante 5 segundos.

Biométrica, Inc.  
5627 Oberlin Drive, Suite 120  
San Diego, CA 92121, USA

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Información para pedidos:  
Web: [www.biometrica.com](http://www.biometrica.com)  
Correo electrónico: [orders@biometrica.com](mailto:orders@biometrica.com)  
Teléfono: 00 1 858 550 0308

Doc # 130061CE-Spanish Rev C - 20170718

Glosario de símbolos armonizados			
IVD	Dispositivo in Vitro	Limitaciones de temperatura	Usar por
REF	Número del catálogo	No volver a usar	EC REF Representante Autorizado
LOT	Código de lote	Mantener lejos de la luz del sol.	CE Distintivo CE
Icono de libro	Consultar las instrucciones		

## **SalivaGard *HT* ADN IFU Directions**

---

Instrucciones de uso se pueden obtener a través de Internet en <http://biometrica.com/salivagard-ht-dna.php>, llamando al siguiente número de teléfono: 00 1 858 550 0308, o llamando a su proveedor local.